



## DAX Ytdesinfektion Plus

DAX Ytdesinfektion Plus är avsedd för desinfektion av släta ytor, t.ex. undersökningsbritsar, bänkar, bord etc. Produkten är effektiv mot bakterier, svamp och olika typer av virus som t.ex. Hepatit B, C och HIV.

### Fördelar med DAX Ytdesinfektion Plus

- Består av ipa och har 45 volymprocent alkoholstyrka
- Verkar snabbt och avdunstar utan att lämna spår efter sig på den behandlade ytan
- Tillsatsen av tensid som smutslösare gör att ytan inte behöver förbehandlas
- God upplösande effekt på t.ex. spill av blod

### Gör så här/Dosering:

- Dränk in en torkduk med utspädd brukslösning alternativt spruta direkt på ytan.
- Bearbeta ytan upprepade gånger.
- Lämna ytan lätt fuktig i slutet av inverknings tiden och låt lufttorka.
- Använd så mycket ytdesinfektionsmedel att ytan är fuktig under hela kontakttiden (se sidan 2 för kontakttid).



| Produktnamn                     | Art.nr | Antal st/krt | Antal krt/pall | EAN           |
|---------------------------------|--------|--------------|----------------|---------------|
| DAX Ytdesinfektion Plus 300 ml  | 461-24 | 24           | 45             | 7331964004616 |
| DAX Ytdesinfektion Plus 1000 ml | 468-12 | 12           | 30             | 7331964004685 |
| DAX Ytdesinfektion Plus 5000 ml | 469-3  | 3            | 36             | 7331964004692 |

# DAX Ytdesinfektion Plus

## Mikrobiologisk information

### Bactericidal effekt

EN 13727 Pseudomonas aeruginosa 30 sek  
Staphylococcus aureus 30 sek  
Enterococcus hirae 30 sek  
Escherichia coli 30 sek

EN 13697 Pseudomonas aeruginosa 60 sek  
Staphylococcus aureus 60 sek  
Enterococcus hirae 60 sek  
Escherichia coli 60 sek

### Yeasticidal effekt

EN 13624 Candida albicans 30 sek

EN 13697 Candida albicans 60 sek

### Mycobactericidal effekt

EN 14348 Mycobacterium terrae 60 sek  
Mycobacterium avium 60 sek

### Virucidal effekt

EN 14476 Adenovirus 5 min  
Human Rotavirus 2 min

DVBV/RKI\* Bovine viral diarrhoea(BVDV) 30 sek (surrogate of HCV)  
Vaccinia virus 30 sek

\*Deutsche Vereinigung zur Bekämpfung der Viruskrankheiten (DVBV) och Robert Koch-Institute (RKI).

## Innehåll:

- pH-värde 8,5

## Typ av formulering

- Vätska

## Förpackningsmaterial

- Högdensitetspolyeten (HDPE)

| Produktnamn                     | Art.nr | Antal st/krt | Antal krt/pall | EAN           |
|---------------------------------|--------|--------------|----------------|---------------|
| DAX Ytdesinfektion Plus 300 ml  | 461-24 | 24           | 45             | 7331964004616 |
| DAX Ytdesinfektion Plus 1000 ml | 468-12 | 12           | 30             | 7331964004685 |
| DAX Ytdesinfektion Plus 5000 ml | 469-3  | 3            | 36             | 7331964004692 |